



GLOBAL SKIN

ELECTROPORATION & NEEDLE SYSTEM

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —



SKINDERMA

La electroporación combinada con la técnica de microagujas permite trabajar con mayor espectro de principios activos de diversos pesos moleculares, tanto bajos como altos.

La capacidad vehiculizadora de la electroporación & micro agujas supera en varios órdenes de magnitud a cualquier otra técnica electroestática.

RESULTADOS

- El rostro rejuvenece y parece menos cansado.
- Clara mejoría de la piel: hidratada gana en tonicidad.
- El tono se unifica.
- La piel flácida se reestructura y redensifica.
- La piel recupera su elasticidad y se alisa.

Los efectos de la electroporación permiten trabajar con una profundidad de aguja menor para obtener excelentes resultados.



9 electrodos + cabezal de micro agujas recambiables.

SELECTOR DE PROFUNDIDAD:

Permite seleccionar la profundidad de la aguja desde 0.0 a 2.0 mm.

PANTALLA LCD:

Para controlar fácilmente el menú con luz indicadora.

VELOCIDAD:

Ajustable en tres niveles
4000 / 4500 / 5000 RPM.

ELECTROPORACIÓN:

Ajustable en 5 niveles.

TIEMPO:

Contador ascendente de 30 minutos.

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —

¿Qué es la ELECTROPORACIÓN?

La electroporación o mesoterapia virtual es una técnica que utiliza los **impulsos electromagnéticos para mejorar la penetración de los principios activos a través de la piel.**


Nuestro organismo en su contenido hídrico, permite la conducción de la corriente eléctrica. La electroporación consiste en el paso de una corriente eléctrica que genera un campo electromagnético.

Una de sus características principales por el paso de esta corriente es la **permeabilización transitoria de la membrana plasmática celular** por despolarización.

Los impulsos electromagnéticos de corta duración producen la **apertura transitoria de los microcanales de la membrana celular** consiguiendo que los activos cosméticos lleguen a niveles más profundos de la piel y ejerzan una acción más potente.




RESULTADOS
VISIBLES Y
SATISFACTORIOS
A LAS 24h. DE LA
APLICACIÓN

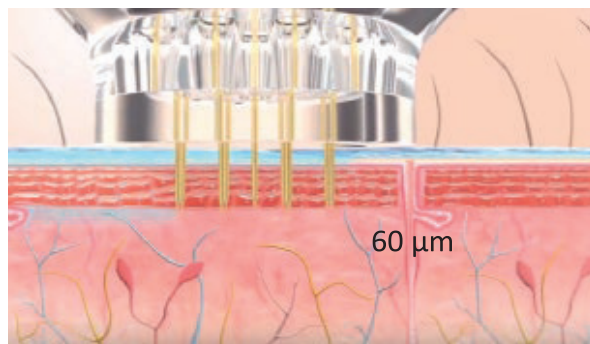

Aplicación tópica de activos:
Profundidad alcanzada: 20 µm

Aplicación de activos con
microagujas:
Profundidad alcanzada: 60 µm

Aplicación de activos con
electroporación:
Profundidad alcanzada: 60 µm

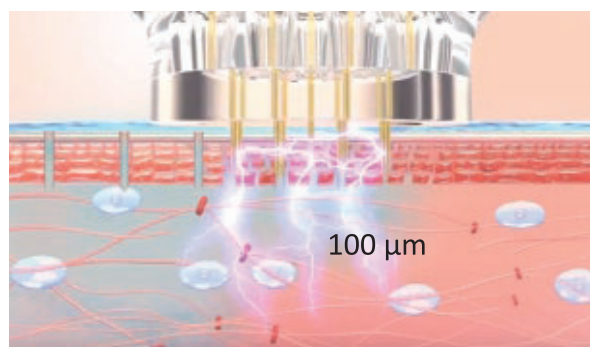

Aplicación de activos con
microagujas + electroporación:
Profundidad alcanzada: 100 µm



sinergia con
principios activos



Protocolo 60'



Facial



Corporal

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —



SKINDERMA

— MEDICAL COSMETICS —

Pol. Ind. Valle del Cinca, calle C/C, 53.

22300 Spain

+34 974 26 98 37

 @skindermamedicalcosmetics
www.skinderma.es