



HYDRALInfusion PRO

LIMPIEZA PROFUNDA


HIDRODERMOABRASIÓN

NUTRICIÓN ACTIVA

6 PROTOCOLOS

HYDRALinfusion PRO

LIMPIEZA PROFUNDA - HIDRODERMOABRASIÓN - NUTRICIÓN ACTIVA

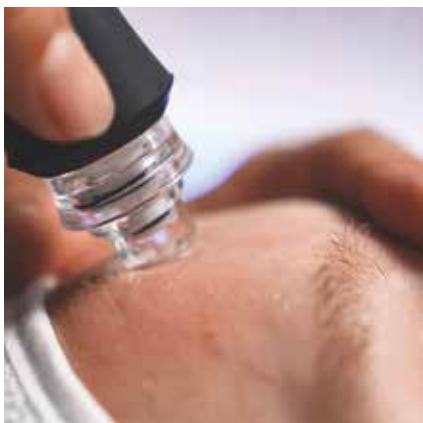

HYDRALinfusion Pro es la nueva generación de aparatología estética desarrollada por **Skinderma Technology**, enfocada en tratamientos faciales integrales y personalizados.

Este equipo ha sido **diseñado para optimizar procedimientos de limpieza profunda, exfoliación, hidratación y nutrición, integrando diferentes tecnologías** en un solo dispositivo.



HYDRALinfusion Pro combina tecnología estética avanzada con una aplicación precisa de activos dermocosméticos, ofreciendo un tratamiento completo en un solo dispositivo. **El protocolo integra limpieza facial profunda, exfoliación mecánica y química, hidratación intensiva y estimulación celular.**

Gracias a sus cuatro manípulos, permite trabajar en distintas fases del tratamiento, **adaptándose a las necesidades individuales de cada piel:**



 **Hidrodermoabrasión:** limpieza y exfoliación mediante presión negativa y cabezales específicos.


 **Vibración y oxigenación:** exfoliación combinada con activos encapsulados y masaje reafirmante con cabezal de silicona.

 **Radiofrecuencia multipolar:** reafirmación cutánea mediante calor controlado.

 **Ultrasonido con dosificación interna:** penetración profunda de principios activos seleccionados.



SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —

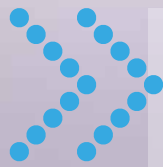

Manípulo de Hidrodermoabrasión

Realiza una limpieza profunda de los poros mediante presión negativa combinada con una infusión de activos específicos. **Su acción exfoliante suave elimina células muertas y mejora la textura de la piel.**

Presión negativa y exfoliación: La aplicación de cabezales con succión controlada **genera una hidrodermoabrasión que elimina células muertas, limpia los poros y prepara la piel para recibir activos.**

SKINDERMA
— MEDICAL COSMETICS —



Manípulo de Ultrasonido con dosificación

Permite la penetración eficaz de principios activos mediante vibraciones de alta frecuencia, mejorando la absorción de los productos aplicados y favoreciendo la regeneración celular.

Dispone de dos cabezales intercambiables, sistema interno de dosificación tipo jeringa que libera los principios activos de forma progresiva y controlada durante la sesión:

Cabezal metálico plano: indicado para zonas del rostro y cuello, permite un deslizamiento uniforme con una acción profunda y localizada.

Cabezal roll-on: especialmente diseñado para zonas específicas y delicadas, como el contorno de ojos o labios.



Manípulo de Vibración con cápsula exfoliante

Efecto Bohr

Cápsula exfoliante: realiza una **exfoliación combinada mecánica y química** mediante una cápsula que contiene principios activos integrados. Al entrar en contacto con un gel activador, que actúa como medio de reacción, la cápsula se activa, liberando sus componentes sobre la piel. Esta acción permite una exfoliación efectiva mientras aporta beneficios específicos según la fórmula de la cápsula, dejando la piel limpia, suave y revitalizada.



Manípulo de Masaje

Cabecal de silicona: para masajes de oxigenación y efecto lifting.

Estimula el flujo sanguíneo y el drenaje linfático.

Mejora significativamente la absorción de ingredientes activos.

Aumenta la permeabilidad del estrato córneo.

Mejora la nutrición y oxigenación de la piel.



Manípulo de Radiofrecuencia Multipolar


Estimula la producción de colágeno y elastina a través de calor profundo controlado. Mejora la firmeza cutánea, suaviza líneas de expresión y favorece la regeneración de la piel.

Cápsulas PODS

Diseñadas para actuar en sinergia, activando sus potentes ingredientes justo en el momento de aplicación.


Cada cápsula ofrece un triple efecto único: oxigenación natural, exfoliación suave y absorción óptima de los principios activos, adaptándose a las necesidades específicas de cada tipo de piel.

Ingredientes activos en estado puro, manteniéndolos intactos hasta que entran en contacto con el exclusivo gel Primer.

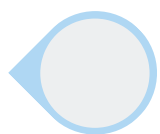


BALANCING Cápsula Equilibrante.

Purifica, limpia y equilibra. Formulada con **carbón activo, ácido mandélico y extracto de camu camu**, esta cápsula ayuda a eliminar impurezas, absorber el exceso de sebo y mejorar visiblemente el aspecto de la piel. Ideal para pieles grasas, mixtas o con tendencia a imperfecciones.

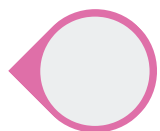

REVIVING Cápsula Revitalizante.

Reafirma, suaviza y protege. Con una combinación avanzada de alga roja, retinol y ácido ferúlico, esta cápsula está diseñada para combatir los signos del envejecimiento, reducir la apariencia de arrugas y reforzar la protección frente a factores ambientales. Aporta luminosidad y firmeza.

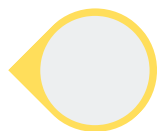


ILLUMINATING Cápsula Iluminadora.

Unifica, refresca e ilumina. Gracias al **ácido kójico, vitamina C estabilizada, alfa-arbutina y extractos naturales de nopal y zanahoria**, esta cápsula contribuye a igualar el tono de la piel, aportando un efecto revitalizante e iluminador, mientras mejora su textura y elasticidad.



DETOX Cápsula detoxificante

Formulada con **extracto de té verde y gluconato de cobre**, se activa al mezclarse con el gel Primer. Esta combinación oxigena la piel, permitiendo una absorción profunda de sus potentes antioxidantes. El resultado es una piel más limpia, equilibrada y visiblemente rejuvenecida.

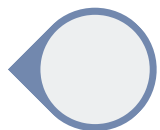

GLAM Cápsula Glam

Revitaliza la piel desde el interior, aportándole energía y firmeza. Sus partículas de **oro puro y el complejo de péptidos** ayudan a prevenir la pérdida de colágeno y a mejorar la elasticidad de la piel. Los **aminoácidos de seda** completan la acción, dejando la piel más suave, hidratada y con un acabado impecable y luminoso.



HYDRATE Cápsula hidratante

Formulada con **espirulina azul, células madre, ácido fólico y ácidos P-hidroxilados**. Este combinación innovador oxigena la piel y mejora su hidratación profunda. El resultado es una piel restaurada, radiante y visiblemente más joven.




HYDRALInfusion PRO

LIMPIEZA PROFUNDA

 HIDRODERMOABRASIÓN

NUTRICIÓN ACTIVA

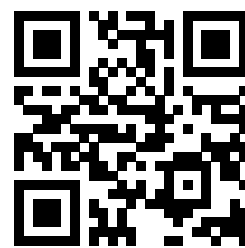

Skinderma Cosmetic S.L.
C/ Peña Manteca, F 15-16
Parque emp. Argame
33163 - Asturias - España
hola@skindermacosmetics.es
@skindermamedicalcosmetics
www.skindermacosmetics.es